



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace Plus»

Описание

Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace Plus», предназначенное для незрячих и людей с нарушением зрения, это сканер и читающая машина в одном. Устройство совместимо с некоторыми дисплеями Брайля и позволяет почти мгновенно переводить текст в Брайль.


Асе имеет встроенные динамики, аккумуляторную, заменяемую пользователем батарею и 10-дюймовый экран встроенный экран.

Внешний вид

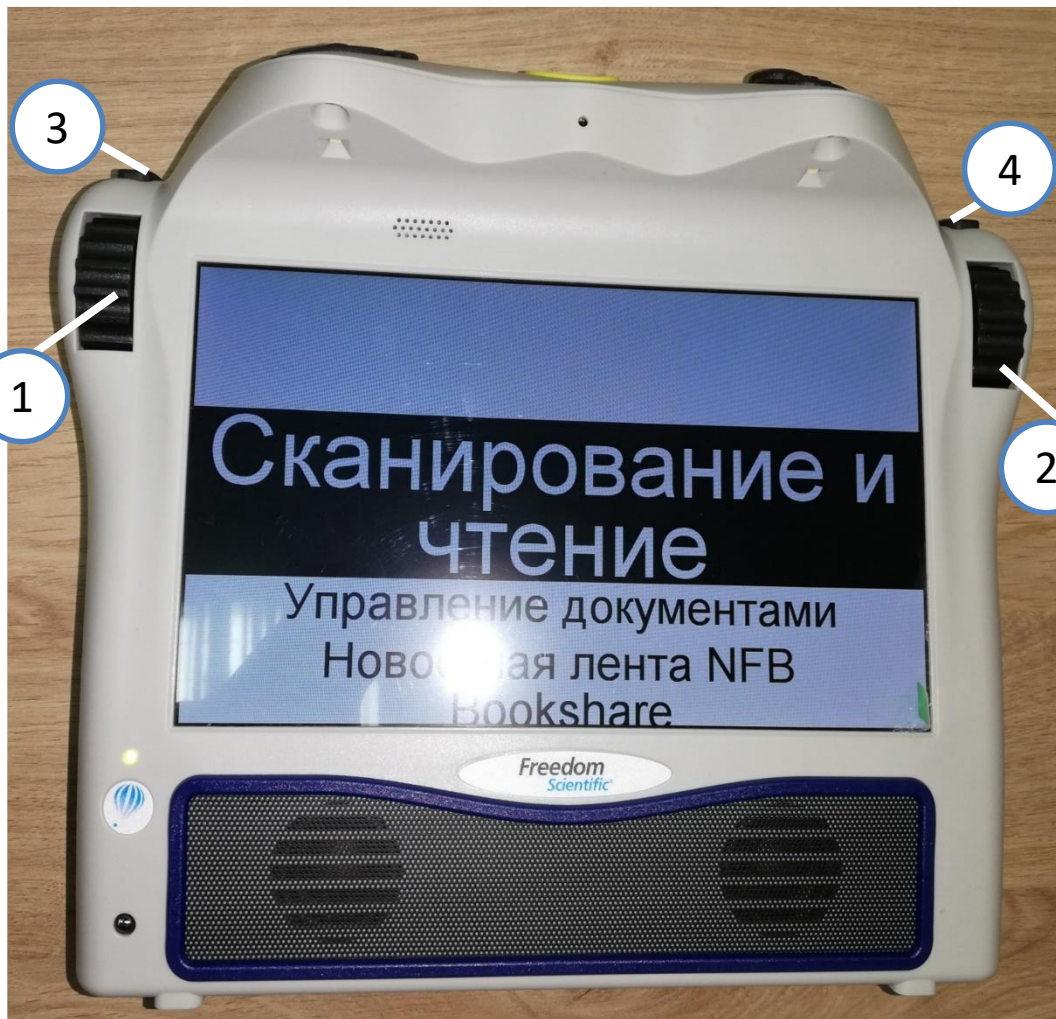


1. Левый ролик (увеличивает/уменьшает размер шрифта)
2. Правый ролик (прокрутка вверх/вниз для перехода к предыдущей или следующей строке)
3. Кнопка «Назад» (используется в режиме сканирования и чтения)
4. Кнопка «Действия» (для приостановки и возобновления чтения)

Внешний вид

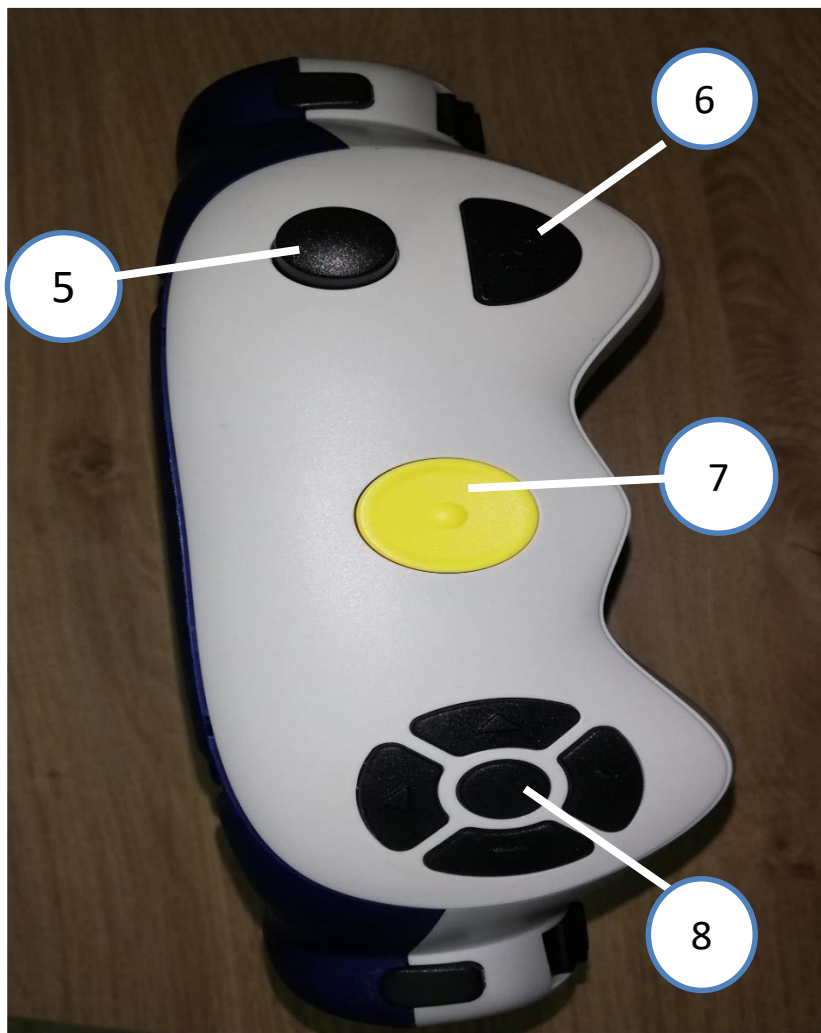

- 5. Регулятор громкости
- 6. Кнопка «Сканировать»
(используется, чтобы сфотографировать текст для сканирования)
- 7. Кнопка Домой (для входа в главное меню)
- 8. Кнопки «Ромашки»
(состоит из пяти кнопок, функции каждой кнопки Ромашки зависят от приложения которое вы используете)

Внешний вид

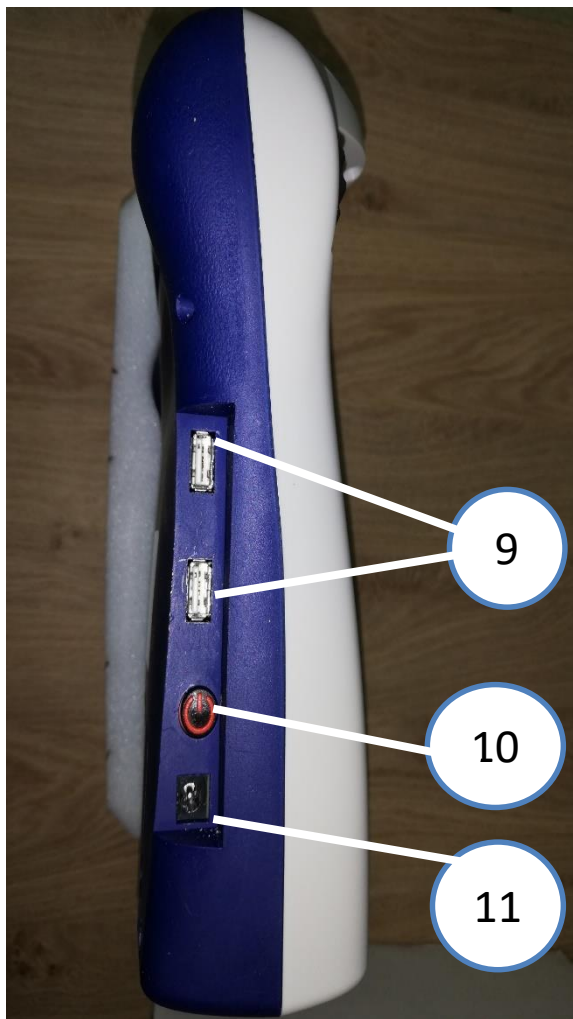

9. USB порты

10. Кнопка питания

11. Разъем для подключения питания

Подведем итог:

Используйте правый ролик для прокрутки пунктов меню и кнопку «Действие», чтобы подтвердить выбор меню.

Используйте кнопку «Назад», чтобы вернуться из подменю в предыдущее меню. Используйте кнопку «Домой» для возврата в главное меню.

Настройки и управление

- Доступные следующие настройки:

- Общие настройки:

- Скорость чтения
- Режим чтения
- Голос(выберите язык и голос)
- Режим левого ролика
- Режим центральной кнопки
- Шрифт
- Размер шрифта
- Контраст
- Формат времени
- Перенос слов для Брайля
- Время ожидания

Настройки и управление

- Системные настройки:
 - Настроить Главное меню
 - Обновление программного обеспечения
 - Установить дату и время
 - Сон (используйте эту команду, чтобы немедленно перевести устройство в режим ожидания)
 - Выключить устройство (используется для безопасного отключения)

Настройки и управление

- Список опций Главного меню
 - Сканирование и чтение
 - Управление документами
 - Увеличение
 - Календарь(включает функцию напоминания)
 - Фотоальбом
 - Часы(включает функцию будильника)
 - Настройки
 - Помощь

Настройки и управление

- Сканирование и чтение:

Эта функция позволяет вам читать напечатанный текст, такой как письма, книги, надписи на упаковках с едой и лекарствами, Асе читает печатный текст вслух(если не используется дисплей Брайля) и отображает напечатанный текст на экране.

Режим чтения:

Аудио: удобен тем, что текст читается вслух — **установка по умолчанию.**

Текстовом: используется для беззвучного чтения текстов на экране — без голосового вывода.

Эти режимы могут быть переключены в настройках

Настройки и управление

- Настройки аудиорежима:
 - Скорость чтения регулируется с помощью левого ролика;
 - Голос/Язык настраивается в главном меню, затем выделить общие настройки и прокрутить список, чтобы выбрать функцию «Голос чтения», далее прокручиваем комбинацию язык/голос;
 - Перемещение по тексту используются пять кнопок Ромашки и правый ролик;
 - Для прочтения отсканированного документа нужно нажать на кнопку Действия;

Настройки и управление

- Управление документами:
 - Асе позволяет сохранять одностраничные документы, многостраничные и книги;
 - Чтобы открыть ранее сохраненный документ, нужно в Главном меню выбрать «Управление документами», выбрать нужный документ или книгу и начнется зачитываться вслух;
 - Возможно сохранение документа/книги с USB путем конвертации в текст или MP3;
 - Удобная навигация по книге, при переходе на следующую страницу услышите «Открыта страница два из трех»;
 - Возможно удаление ранее сохраненного документа;

Настройки и управление

- **Календарь/Напоминания:**
 - Приложение позволяет создать для себя напоминание, используя свой голос;
- **Фотоальбом:**
 - Фотоальбом позволяет загружать фотографии или любые изображения в формате JPEG или PNG на ваше устройство с USB-накопителя, записывать голосом название альбома;
- **Часы/Будильник:**
 - Чтобы отрегулировать текущую дату/время нужно зайти в «Системные настройки»;

Важно

- Помощь:
 - Чтобы услышать подробное описание возможностей Асе и функций каждой кнопки, выберите в Главном меню пункт «Помощь».
 - Нажав любую кнопку, вы прервете зачитывание справки и Асе будет объяснять назначение выбранной кнопки.
 - Если нажмете Домой, то вернетесь в Главное меню.

Важно

- Питание и аккумулятор:
 - Перед первым использованием аккумулятор Ace должен быть полностью заряжен;
 - Время зарядки: 4 часа;
 - Не используйте Ace пока он заряжается в первый раз;
 - При работе устройства от батареи , чтобы потреблять меньше энергии, в период бездействия Ace переходит в режим ожидания;



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace Plus»