



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Джойстик компьютерный Joystick SimplyWorks беспроводной

Описание

Джойстик SimplyWorks предназначен для четкого перемещения курсора и его точного попадания на объект, расположенный на экране.

Устройство откликается на малейшее прикосновение (чувствительность на уровне 0,5 Н) и является идеальным средством для людей, имеющих проблемы с двигательными функциями (тремор).

Внешний вид



Внешний вид



Внешний вид





Пользовательские характеристики

- частота передачи сигнала $\sim 2,4$ Гц;
- три разноцветные кнопки: правая и левая - дублируют клавиши мыши, центральная - блокировка перетаскивания мышью;
- кнопки утоплены в корпус для исключения случайного нажатия;

Пользовательские характеристики

- два разъема (по бокам корпуса) для подключения выносных кнопок Smoothie;
- размер ДШВ:180*103*63 мм (без рычажка); в комплекте три варианта насадок на рычаг (I-образный, T-образный, рычаг-шар)
- четыре возможности настройки скорости перемещения курсора, сопровождаемые предупреждающими сигналами;



Подключение

- 1) на задней панели джойстика снимите крышку и поместите в отсек элемент питания.
- 2) подключите имеющийся ресивер в свободное гнездо USB на вашем компьютере – расстояние в пределах 1 м.;
- 3) нажмите и удерживайте в течение 10 с. кнопку сопряжения (Pair) на джойстике. Загорится на джойстике светодиодный индикатор, который начнёт медленно мигать. Плотно закройте крышку;
- 4) работа осуществляется по радиоканалу. Помехи от электроприборов в зоне действия клавиатуры отсутствуют. Радиус действия – 10 м.

Важно

- совместим со всеми приемниками SimplyWorks;
- необходимы элементы питания - 6LR61 (PP3 6F22) – тип «Крона», суммарно питание: 9В;
- в джойстике не имеется никаких составных частей, требующих специального обслуживания;
- джойстик имеет четыре возможные настройки управления скоростью курсора;



Важно

- для задания скорости нажмите и удерживайте кнопку (Drag Lock) до звукового сигнала, после чего – отпустите. Уменьшение скорости – нажмите Life Click, увеличение скорости – нажмите Right Click. Если вы выбрали скорость перемещения курсора, то снова нажмите и удерживайте кнопку (Drag Lock) до звукового сигнала. Скорость перемещения будет задана.

Важно

- в случае выключению джойстика или отсутствие перемещения курсора: проверьте заряд элемента питания и проведите повторное выполнение процедуры сопряжения.
- в случае, если устройство работает с перебоями – проверьте расстояние от устройства и приемника. Возможно наличие внешних помех – в этом случае отодвиньте приемник и джойстик подальше от источника помех.



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Джойстик компьютерный Joystick SimplyWorks беспроводной