



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Электронный ручной видео- увеличитель (ЭРВУ) «Comrast+ HD»

Описание

Compact+ HD — это компактный видеоувеличитель от компании Opteles. Он обеспечивает регулируемое увеличение для текстов и символов всех размеров. Подходит для документов различных типов. Благодаря яркому широкоформатному экрану, вы четко увидите текст, изображения и объекты даже при солнечном свете. Есть возможность настроить цвета, которые предпочитаете вы.

Возьмите Compact+ HD с собой, чтобы с легкостью читать ценники, карты, журналы, рецепты, расписание движения транспорта и многое другое. Устройство легко поместится в кармане или сумке за счет небольшого размера, а наличие складной ручки сделает использование еще более удобным.

Внешний вид (комплектность)



1. Кнопка зума /уменьшение
2. Кнопка зума /увеличение
3. Кнопка Режим
4. Кнопка Вкл/Выкл
5. Кнопка Снимок
6. Складная ручка

Технические характеристики

- Увеличение — от 3 до 10 крат;
- Тип экрана — полноцветный широкоформатный TFT-дисплей;
- Диагональ экрана — 4,3 дюйма;
- Разрешение экрана — 480×272;
- Цветовые режимы — 4;
- Режимы по умолчанию: режим негатива, белый на черном, режим позитива, черный на белом;
- Комбинации режимов — 2;
- Настраиваемые режимы просмотра документа: полноцветный для просмотра фотографий и изображений, чёрный текст на жёлтом фоне;
- Встроенная светодиодная подсветка;
- Широкий угол обзора;
- Сохранение увеличенных изображений — до 4-х изображений в памяти устройства;
- Складная ручка;
- Время работы от аккумулятора — до 3 ч непрерывного использования;
- Время зарядки аккумулятора — 3 ч;
- Габариты — 13×8×3,3 см;
- Вес — 252 грамм;



Технические настройки

Кнопка «Вкл./Выкл.»

Нажатие кнопки Вкл./Выкл. (On/Off) в левой части корпуса и удержание её в течение 1 секунды включает и отключает питание устройства. Камера и зеркало камеры видеоувеличителя Compact+ HD расположены на задней стороне видеоувеличителя. Слева и справа от камеры установлены осветители объектов.

Включение и выключение питания

При первом включении видеоувеличитель Compact+ HD должен быть полностью заряжен. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку в левой части экрана. Произойдёт перезагрузка компьютера в том же режиме, в котором он работал перед выключением. Для отключения видеоувеличителя Compact+ HD нажмите оранжевую кнопку и удерживайте её в течение 1 сек.

При включении видеоувеличителя Compact+ HD отображение на экране появится через 3 секунды

Настройка видеоувеличения

Для изменения настроек увеличения конкретного устройства вы можете просто нажать кнопки “+” или “-” с правой стороны экрана. Кнопка “+” повышает, а кнопка “-” понижает величину зума; минимальное увеличение: в 2,8 раза, а максимальное – в 11 раз



Технические настройки

Выбор режима отображения

Нажатие кнопки «Режим» (Mode) в правой стороне экрана позволяет просматривать следующие режимы:

Фоторежим: полноцветные тексты и фотографии

Режим негатива: чтение в высококонтрастном режиме: белый шрифт на чёрном фоне

Режим позитива: чтение в высококонтрастном режиме: чёрный шрифт на белом фоне

Высококонтрастная цветовая комбинация 1: **жёлтое на синем**

Высококонтрастная цветовая комбинация 2: **жёлтое на чёрном**

Нажатие и удержание кнопки Режим в течение 3 секунд включит или отключит подсветку. Переключение режимов автоматически включает подсветку объекта.



Технические настройки

Использование кнопки «Снимок»

Кнопка “Снимок” позволяет сохранить актуальный образ текста или изображения.

- Удерживайте видеоувеличитель Compact+ HD над текстом или изображением, которые нужно сканировать.
- Для съёмки нажмите кнопку “Снимок” справа в верхней части устройства.
- Поднесите видоискатель увеличителя Compact+ HD ближе к глазам, чтобы как следует рассмотреть объект или текст.
- Нажмите кнопку «Режим» для изменения режима просмотра.
- Выполните операции с помощью кнопок увеличения (правая сторона экрана) – для изменения изображения необходимы 3 операции.
- Во время просмотра фотографий удерживайте кнопку “Снимок” в течение 2 секунд для сохранения изображения и затем вернитесь в режим просмотра фотографий. Максимум 4 изображения можно сохранить в памяти видеоувеличителя Compact+ HD. Новое изображение будет записано вместо старого.
- Для «размораживания» изображения повторно нажмите ту же кнопку. Теперь можно сделать новый снимок.

Важно!!!

Меры безопасности

- Не подвергайте видеоувеличитель Compact+ HD чрезмерному нагреву и попаданию прямого солнечного света, чтобы избежать риска пожара.
- Не удаляйте детали из видеоувеличителя Compact+ HD. Свяжитесь со своим поставщиком Optelec для обслуживания устройства.
- Чтобы избежать риска удара током, держите видеоувеличитель Compact+ HD вдали от жидкостей и химических веществ.
- Обращайтесь с видеоувеличителем Compact+ HD с осторожностью.
- Неаккуратное обращение может повредить его внутренние компоненты.
- Не используйте видеоувеличитель Compact+ HD вблизи плохо экранированных медицинских приборов.
- Не пытайтесь открывать батарейный отсек и извлекать аккумулятор.
- Несанкционированное вскрытие устройства приведет к утрате гарантии. Устройство содержит детали, не предназначенные для починки пользователем.
- Для обслуживания данного устройства обращайтесь к вашему поставщику. Не разбирайте видеоувеличитель, потому что иначе вы утратите право на его гарантийное обслуживание.